

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材 JMDNコード 70735000

オーソドッツ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の原材料で作られています。
シリコンワックス、キサンタンガム



【使用目的又は効果】

矯正装置による口腔内粘膜への刺激を緩和するために、装置を被覆する保護材として用います。

【使用方法等】

- (1) 個包装を開封します。
- (2) 個包装から本品を取り出します(包装から透けて見えた面のみが粘着性を持っています)。
- (3) 痛みがある部位の矯正装置に、本品の粘着面を3～5秒間押し付け、矯正装置を覆うように整えます。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

本品の粘着面は1面のみです。矯正装置に押し付ける際には、粘着面の向きにご注意ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
- (2) 廃棄する際は、地域の規則に従ってください。

2. 不具合・有害事象

- (1) 一度装着、使用された製品は、変形、劣化、強度低下を招き、感染症を誘発するおそれがあります。
- (2) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 埃、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずるおそれのない場所、及び外圧のかからない場所に保管してください。
- (2) 常温、常湿で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：トミー株式会社

 TEL 042-363-1151
<http://www.tomyinc.co.jp/>

発売元：TOMY INTERNATIONAL INC.[®]

 株式会社 トミー インターナショナル
TEL 03-3258-2231
<http://www.tomy-ortho.co.jp/>