

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材 JMDNコード 70735000

オーソシル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の原材料で作られています。
シリコンワックス

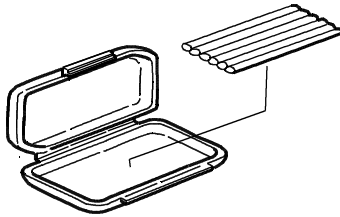

【使用目的又は効果】

矯正装置による口腔内軟組織の刺激を和らげるための保護材として用います。

【使用方法等】

少量を指で取り、ブラケットやバカルチューブの凸部に載せ、覆います。

【使用上の注意】*

1. 重要な基本的注意
 - (1) 変色や変質などの異状が認められた時は、使用を控え、弊社販売担当者に連絡してください。
 - (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
 - (3) 歯科医療従事者の指導の下、適切に使用させてください。
2. 不具合・有害事象

一度装着、使用された製品は、変質、劣化を招き、感染症を誘発するおそれがあります。


【保管方法及び有効期間等】*

〔保管方法〕

直射日光、高温多湿、紫外線を避けて保管してください。

〔有効期間〕

ラベルに表示されている使用期限以内に使用してください。

※例)  XXXX-XX は、使用期限XXXX年-XX月を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：トミー株式会社

 TEL 042-363-1151
http://www.tomyinc.co.jp/

発売元：TOMY INTERNATIONAL INC.®

 株式会社 トミー インターナショナル
TEL 03-3258-2231
http://www.tomy-ortho.co.jp/

製造元：DENTSPLY International Raintree Essix
(アメリカ合衆国)