

リンガルリテーナ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】＊


本品は、次の原材料で作られています。
ステンレス鋼(鉄、クロム、ニッケル、銅、マンガン、
ニオブ、モリブデン、コバルト)
金ろう(銀、金、銅)

下顎犬歯間用

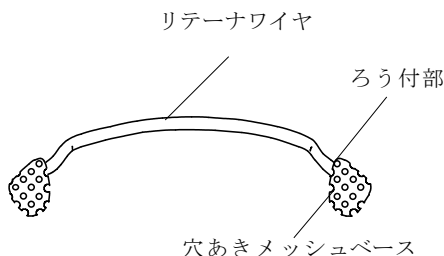

サイズは、No.30～39 まで約 1mm 間隔で 10 サイズあります。ボンディングベースはフォイルメッシュベースと穴のあいたメッシュベースがあります。

上顎中切歯用

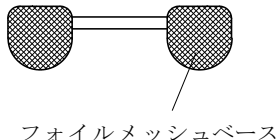

ボンディングベースはフォイルメッシュで、スモール、ミディアム、ワイドの3種類があります。

【使用目的又は効果】

矯正治療終了後、一定期間装着し、保定することにより歯列の戻りを防ぐために用います。

【使用方法等】

- (1) 患者のデンタルモデルに合わせてサイズを選び、歯列の舌側面にリテーナワイヤが密着するように曲げ調整します。
- (2) 本品は矯正用接着剤を用いてボンディングベースを歯牙の舌側面に直接取り付けます。接着剤を使用する際は、接着剤の取扱説明書を参照してください。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) 油脂等により接着力が低下するため、接着面に触れないでください。
- (2) 光重合タイプの接着剤を使用する場合は光照射を充分に行ってください。高出力のLEDライトを推奨します。

- (3) 変形や脱落の原因となりますので、治療上過大な力を加えないでください。

【使用上の注意】＊ ＊

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
- (2) 患者の来院時、本品に亀裂等の不具合、変質が無いことを確認してください。
- (3) 硬いものを噛まないよう、指導をお願いします。破損やエナメル剥離の原因となることがあります。
- (4) 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していません。(自己認証による)
- (5) MRI検査を受ける際は、矯正機器を装着していることを担当医師へ申し出るよう伝えてください。
- (6) 廃棄する際は、地域の規則に従ってください。

2. 不具合・有害事象

- (1) 一度装着、使用された製品は、変形、劣化、強度低下を招き、感染症を誘発するおそれがあります。
- (2) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。
- (3) 接着剤の劣化により歯面からベースがはく離するおそれがあります。
- (4) ろう材の劣化によりワイヤがベースから剥れるおそれがあります。
- (5) 本品に含まれる金属は、強磁場を発する機器(MRI等)の影響で発熱するおそれがあります。また、機器に対して撮影画像の乱れ等の影響を及ぼすおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 埃、イオウ分、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずるおそれのない場所、及び外圧のかからない場所に保管してください。
- (2) 直射日光、紫外線を避け、常温、常湿で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊ ＊

製造販売元：トミー株式会社

 TEL 042-363-1151
<https://www.tomyinc.co.jp/>

発売元：TOMY INTERNATIONAL INC.®

 株式会社 トミー インターナショナル
TEL 03-3258-2231
<https://www.tomy-ortho.co.jp/>