

## バックルチューブB

再使用禁止



### 【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には、使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】\*\*

本品は、次の原材料で作られています。  
ステンレス製品/ステンレス鋼（鉄、クロム、ニッケル、銅、マンガン、ニオブ、タンタル、モリブデン、コバルト）  
金ろう（銀、金、銅）  
銀ろう（銀、金）  
チタン製品/チタン

《バックルチューブ》

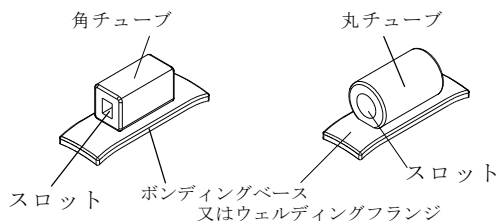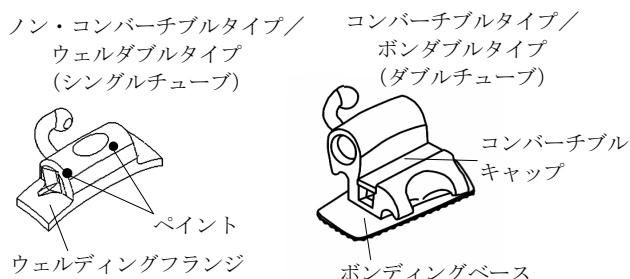

《ソルダラブルチューブ》



詳細は弊社カタログをご参照ください。

### 【使用目的又は効果】\*

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用います。

### 【使用方法等】\*

《バックルチューブの場合》

- (1) 《ボンダブルタイプ》  
ボンディングベース面に矯正用接着剤を塗布して、大白歯に接着します。  
《ウェルダブルタイプ》  
ウェルディングフランジをバンドに溶接し、バンド内側にバンドセメントを塗布し歯冠に被せて取付けます。
- (2) 接着剤又はバンドセメントが硬化した後、アーチワイヤースロットにアーチワイヤーを装着してください。フェイスボウ及びリップバンパを使用する場合は、丸チューブに装着します。
- (3) コンバーチブルタイプは必要に応じてコンバーチブルキャップ

ップを剥がし、結紮線又はエラストメリックリングでアーチワイヤーを固定します。

《ソルダラブルチューブの場合》

- (1) 使用するワイヤーに応じて本品をバンド又はボンディングベースにろう付けして取付けます

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) アーチワイヤーの遠心端で頬の軟組織を傷つけないために、遠心端を曲げるか、又は、アーチワイヤーの位置ずれを防止してください。
- (2) 油脂等により接着力が低下するため、接着面に触れないでください。
- (3) 接着剤の使用法は、接着剤の取扱説明書を参照してください。光重合タイプの接着剤を使用する場合は、光照射を充分に行ってください。高出力のLEDライトを推奨します。
- (4) 変形や脱落の原因となりますので、取扱上過大な力を加えないでください。
- (5) 装着後にマーキング（ペイント）は除去してください。
- (6) ラウンドチュービングは必要な長さに切断して使用してください。

### 【使用上の注意】\*\*

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により、発疹や皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
- (2) 硬いものを噛まないよう、患者に対し指導をお願いします。変形・破損やエナメル剥離の原因となることがあります。
- (3) 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していません。（自己認証による）
- (4) MRI検査を受ける際は、矯正機器を装着していることを担当医師へ申し出るよう伝えてください。
- (5) 廃棄する際は、地域の規則に従ってください。

#### 2. 不具合・有害事象

- (1) 一度装着、使用された製品は、変形、劣化、強度低下を招き、感染症を誘発するおそれがあります。
- (2) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。
- (3) 本品に含まれる金属は、強磁場を発生する機器（MRI等）の影響で発熱するおそれがあります。また、機器に対して撮影画像の乱れ等の影響を及ぼすおそれがあります。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 埃、イオウ分、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずるおそれのない場所、及び外圧のかからない場所に保管してください。
- (2) 直射日光、紫外線を避け、常温、常湿で保管してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売元：トミー株式会社

 TEL 042-363-1151  
<https://www.tomyinc.co.jp/>

発売元：TOMY INTERNATIONAL INC.®

 株式会社 トミー インターナショナル  
TEL 03-3258-2231  
<https://www.tomy-ortho.co.jp/>